

| Bedre støtte, bedre mobilitet

POZ 'IN' FORM **PLUS**

CAREWAVE **PLUS**

PATENT
REGISTERET



Class I medical devices

En ny **PLUS** serie

WIN  CARE



Repositionering

Den mest effektive måde at forebygge tryksår

🔍 Hvorfor?

- > Hjælper med at aflaste og fordele trykket
- > Sikrer postural støtte
- > Korrigerer dårlig kropsholdning
- > Forbedrer komfort og velbefindende
- > Hjælper plejepersonalet med deres opgaver

👤 Hvem?

Enhver, der er i risiko for tryksår, herunder personer med neurologiske lidelser, fysiske handicap og medicinske tilstande, der påvirker deres mobilitet, funktionelle eller fysiske velbefindende.

🕒 Hvornår? ¹

- > **Lejringskift hver 3. time**
med en skummadras med skæring
- > **Lejringskift hver 4. time**
med en statisk memoryskum- eller flerlagsmadras
- > **Lejringsændring hver 8. time**
med en dynamisk luftmadras eller en topmadras, der arbejder med enten konstant, vekslende eller blandet tryk eller med lavt lufttab

Note: (1) HAS - French health authorities guidelines

Skal anvendes som en del af en omfattende plejeløsning:

- +  Plejeseng
- +  Trykaflastende madras (statisk eller dynamisk)
- +  Regelmæssig undersøgelse og vurdering af hud
- +  Ernæring
- +  Trykaflastende pude (statisk eller dynamisk)



Langvarig immobilitet kan føre til komplikationer, herunder tryksår... vi introducerer en ny serie af positioneringspuder fra WinnCare.



Udviklet i tæt samarbejde med **linikere**



Dækker alle **patientbehov**



Repositionering med et **plus**

- + Tilgængelig for sundhedspersonale
- + Effektiv for patienter

En ny omfattende serie med et **PLUS**, egnet til alle typer patienter på tværs af forskellige plejemiljøer.

Vælg mellem **2 typer teknologier** baseret på kliniske behov:

POZ 'IN' FORM **PLUS**



microfibrer


Til **POSITIONERING**



Reduceret mobilitet

> **COMFORT**

CAREWAVE **PLUS**

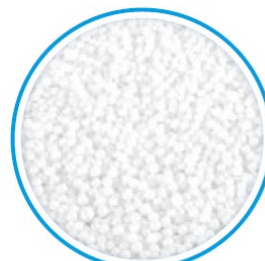

microbeads


Til **STØTTE**



Reduceret mobilitet til immobil

> **CARE**

17 forskellige former tilgængelige, afhængigt af patientens behov:

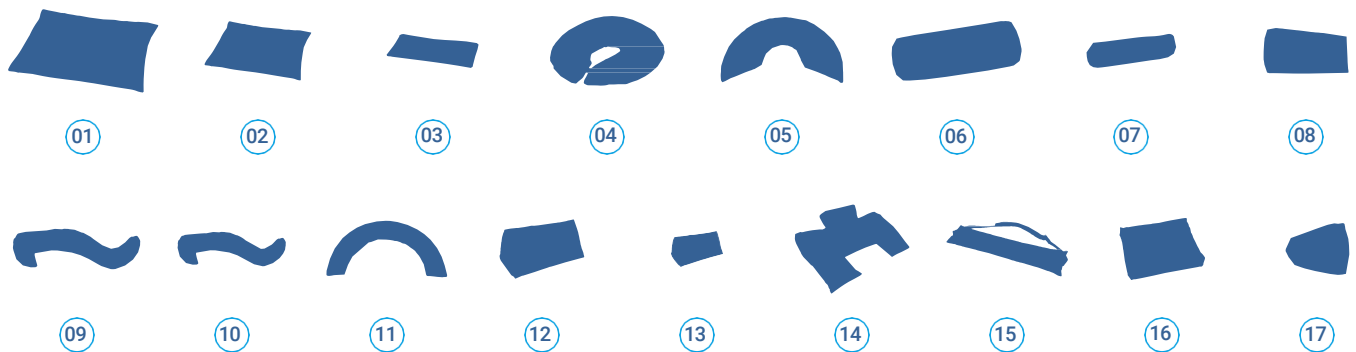

Vælg mellem **tre typer betræk**, der kombinerer **komfort, hygiejne og holdbarhed** for at imødekomme kravene i alle plejemiljøer.

Standard betræk



Højdensitets polyurethan

> **Nem** at rengøre

Comfort betræk



Naturlige cellulosefibre

> Høj **komfort** og **sikkerhed**

Hygiene betræk



CAREWAVE **PLUS**

Polyurethan behandlet med sølv-ioner
Ultralydssvejset

> **Sikker** og **nem** løsning
til flere patienter



Mere end bare et betræk

- Ag+ sølvioner bekæmper udviklingen af mikroorganismer
- Ultralydssvejst for at undgå indtrængning af væsker
- Memory Touch™ konceptet sikrer en jævn spredning af mikroperlerne i betrækket

Alle vores materialer har opnået den højeste certificering, klasse 1 OEKO-TEX, hvilket garanterer, at de er fri for skadelige stoffer og egnede til selv de mest sensitive hudtyper.



**PATENT
REGISTERET**

01 & 02

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Universal pude Nr.1 & 2

Dimensioner:

Pude Nr.1: 45 x 30 x 10 cm

Pude Nr.2: 55 x 40 x 12 cm

Positioneringspuder med flere anvendelsesmuligheder.

Placeres ved de nedre og/eller øvre kropsele, afhængigt af patientens morfologi:

- Trykafastning i vægtbærende områder
- Sikkerhed for, at positioneringen opretholdes
- Beskyttelse af kontaktpunkter og reduceret friktion ved malleoler, knæ og ankler



03

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Universal pude Nr.3

Dimensioner: 45 x 20 x 8 cm

Positioneringspuder med flere anvendelsesmuligheder.

Placeres ved de nedre og/eller øvre kropsele, afhængigt af patientens morfologi:

- Trykafastning i vægtbærende områder
- Sikkerhed for, at positioneringen opretholdes
- Beskyttelse af kontaktpunkter og reduceret friktion ved malleoler, knæ og ankler



04

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Cirkulær pude Nr.4

Dimensioner: 50 x 45 x ø10 cm

Positioneringspude, som anvendes sammen med den cylinderformede pude (Nr. 6) til agiterede patienter:

- Hofte forbliver abduceret under hele forløbet
- Reduceret friktion ved knæene og beskyttelse af kontaktpunkter



05

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Semi-cirkulær pude Nr.5

Dimensioner: 60 x 35 x ø10 cm

Positioneringspude, som anvendes sammen med den cylinderformede pude (Nr. 6) til agiterede patienter:

- Hofte forbliver abduceret under hele forløbet
- Reduceret friktion ved knæene og beskyttelse af kontaktpunkter



06

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Cylinderformet pude Nr.6

Dimensioner: 60 x ø20 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- Når den placeres under knæene, reducerer den spænding i sener og muskler i lænderyggen og afspænder bugvæggen
- Når den placeres under læggene, aflaster den trykket på anklerne
- Når den anvendes sammen med den cirkulære pude (Nr. 4), giver den:
 - Beskyttelse af kontaktpunkter og reduceret friktion ved malleoler, knæ og ankler
 - Muliggør, at benene holdes let adskilt



07

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Cylinderformet pude Nr.7

Dimensioner: 45 x ø12 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- 📏 Beskytter kontaktpunkter, når den placeres mellem ankler, knæ eller malleoler, og reducerer friktion



08

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Skrå pude Nr.8

Dimensioner: 40 x 20 x 9 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- 📏 Anvendes til positionering af både øvre og nedre kropsdele hos ikke-agiterede patienter, og bidrager til:
 - Måltrettet trykaflastning
 - Sikring af, at patienten understøttes i den ønskede position



09 & 10

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Lateral 30° positioneringspude Nr.9 & Nr.10

Dimensioner :

Pude Nr. 9: 180 x 55 x 15 cm

Pude Nr. 10: 170 x 55 x 15 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- 📏 Når den placeres i en semi-lateral 30° position på patientens posteriore overflade, aflaster den trykket i følgende områder: Trochanter, sacrum, ankler og den indre rygsøjle
- 📏 Når den placeres i en semi-ventral position, aflaster den trykket ved lungernes basis og frigør de øvre luftveje
- 📏 Når den placeres under læggene, aflaster den trykket ved anklerne
- 📏 Når den placeres under lårene, reducerer den spændingen i sener og muskler i lænderyggen samt bugvæggen



11

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Halvmåne Nr.11

Dimensioner: 130 x 80 x 20 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- 📏 Når den placeres bag patientens brystkasse, gør den det muligt for patienten at indtage en behagelig semi-siddende position med hævet bryst
- 📏 Når den placeres under læggene, aflaster den trykket ved anklerne
- 📏 Når den placeres under lårene, reducerer den spændingen i sener og muskler i lænderyggen og afslapper bugvæggen
- 📏 Når den anvendes med en **Nr. 6** cylinderformet pude eller en trekantet **Nr.12** pude placeret bag knæene, muliggør den, at patienten kan ligge i en semi-fowler position



12

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Trekantet pude Nr.12

Dimensioner: 60 x 30 x 30 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- 📏 Når den placeres under læggene, aflaster den trykket ved anklerne
- 📏 Når den placeres langs ryggen, og samtidig anvendes med en **Nr.7** cylinderformet pude eller en **Nr.3** universal pude mellem knæene, muliggør den, at patienten kan ligge i en semi-lateral 30° position



13

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Lille trekantet pude Nr. 13

Dimensioner: 45 x 25 x 25 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder:

- || Når den placeres under knæene, reducerer den spændingen i sener og muskler i lænderyggen
- || Når den placeres under anklerne, aflaster den trykket lokalt



14

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Semi-fowler pude Nr. 14

Dimensioner: 70 x 50 x 10 cm

Positioneringspude til en semi-siddende position

- || Når den placeres bag brystkassen, giver den dobbeltsidig støtte til brystet
- || Når den anvendes sammen med en **Nr.12** trekantet pude eller en **Nr.6** cylinderformet pude placeret bag knæene, bidrager den til følgende:
 - Trykaflastning ved mellemgulvet, hvilket fremmer vejrtrækning og iltning
 - Reduceret tryk på sacrum, lænderyg og sædepart
 - Forebyggelse af reflux



15

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Hælaflaster Nr. 15

Dimensioner: 80 x 20 x ø15 cm

Positioneringspude til hælaflastning, som bidrager til følgende:

- || Når den placeres under anklerne, aflaster den hælene
- || Når den anvendes med en eller to **Nr.7** pude placeret bag knæet/knæene, reduceres spændingen i sener og muskler i lænden



16

POZ 'IN' FORM plus



Nakke/hovedstøtte Nr. 16

Dimensioner: 35 x 28 cm

Positioneringspude til nakke- og hovedstøtte:

- || Stabil hovedpositionering
- || Trykaflastning omkring nakke/baghoved
- || Trykaflastning omkring øre i sideleje



17

CAREWAVE plus



POZ 'IN' FORM plus



Benpude Nr. 17

Dimensioner: 35 x 28 cm

Positioneringspude med flere anvendelsesmuligheder. Placeres mellem benene og støtter:

- || Hofterne forbliver abduceret
- || Reduceret friktion og forbedret komfort mellem lårene og knæene



Technical Characteristics

Navn	Nummer + form	Str. i cm (L x B x H eller ø)		BETRÆK		
		CAREWAVE PLUS	POZ'N'FORM PLUS	PROMUST	Lenzing	PROMUST
				PUHD	FR	C.I.D
Universal	01 	45 x 30 x 10	45 x 30 x 15	•	•	•
	02 	55 x 40 x 12	55 x 40 x 15	•	•	•
	03 	45 x 20 x 8	45 x 20 x 10	•	•	•
Cirkulær	04 	50 x 45 x ø10	50 x 45 x ø15	•	•	•
Semi-cirkulær	05 	60 x 35 x ø10	60 x 35 x ø15	•	•	•
Cylinderformet	06 	60 x ø20		•	•	•
	07 	45 x ø12		•	•	•
Skrå	08 	40 x 20 x 9	40 x 20 x 12	•	•	•
Lateral 30°	09 	180 x 55 x 15		•	•	•
	10 	170 x 55 x 15		•	•	•
Halvmåne	11 	130 x 80 x 20		•	•	•
Trekantet	12 	60 x 30 x 30		•	•	•
Trekantet (lille)	13 	45 x 25 x 25		•	•	•
Semi-fowler	14 	70 x 50 x 10		•	•	•
Hælaflaster	15 	80 x 20 x ø15		•	•	-
Nakke/hovedstøtte	16 	-	50 x 40 x ø10	•	•	-
Benpude	17 	38 x 30 x 12	38 x 30 x 16	•	•	•

Reference

POZ 'IN' FORM plus

Reference-skabelon:
VPOZ[Pudens nr.][Betræk]



SG (Betræk)
Standard grå



CG (Betræk)
Comfort grå

Eksempel:
Pude:
Trekantet Nr.12
Betræk:
Standard grå
Reference: VPOZ12SG



CAREWAVE plus

Reference-skabelon til puder med
Standard blå og hygiejne blå betræk:
VCAR[Pudens nr.][Betræk]



SB (Betræk)
Standard blå



HB (Betræk)
Hygiene blå

Eksempel:
Pude:
Halvmåne Nr.11
Betræk
Standard blå
Reference: VCAR11SB



Reference-skabelon til puder
med Comfort blå betræk:
VHCAR[Pude nr.][CB]



CB (betræk)
Comfort Blue

Eksempel:
Pude:
Halvmåne Nr.11
Reference:
VHCAR11CB

