



SPU UNIVERSAL BASIC med hovedstøtte

SPU helsejhl i non-woven-materiale med ekstra stØtte af lår og krop.

ANVENDELSE

- SPU-sejlet vaelges, når der kræves ekstra høj hygiejnstandard, fx ved risiko for smitte eller infektion.
- Til brugere med manglende stabilitet af overkrop, som har behov for ekstra stØtte omkring hovedet.
- Til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng.
- Sejlet har delte benstropper, og giver god stØtte omkring lårene og den høje ryg stØtter overkroppen og giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.
- Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opret-siddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejlet er udført i non-voven-materiale.
- Sejlet har en placeringslomme, som letter påsætningen, når brugeren f.eks. sidder i kørestol.
- Sejlet har styrestropper i begge sider til at lette forflytningen for hjælperen.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale:

PP, non-woven

Størrelser: S-M-L-XL

VARENUMRE:

SPU Universal Basic med hovedstØtte.
Kasse med 10 stk.

	Varenr.	HMI-nr.
S	008-04154	136795
M	008-04155	136797
L	008-04156	136798
XL	008-04157	143989




STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:

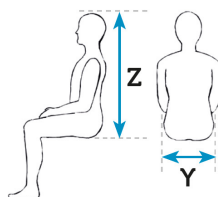

	S	M	L	XL
Y (hoftemål)	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm
Z (mål fra hoved til bagdel)	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm

VASKESYMBOL

Sejlet er udstyret med et vaskesymbol med farveindikator, der advarer, hvis sejlet er blevet for fugtigt eller vådt og derfor skal udskiftes:



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winnocare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winnocare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winnocare.dk for mere info herom.



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winnocare.com

E-mail: info@winnocare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE